

DIGITÁLIS RADIOGRÁFIA
DIGITAL RADIOGRAPHY

CXDI-RF Wireless B1

Használati útmutató

Az ügyfelek számára

A termék használatával és kezelésével kapcsolatos fontos információk

- Ez a termék megfelel azon ország vagy régió helyi rádiófrekvenciás előírásainak, ahol a terméket vásárolta. Vegye figyelembe, hogy a termék más területeken nem használható. A termék használata során kövesse az ebben az útmutatóban található, a rádiófrekvenciára vonatkozó utasításokat.
- A terméket kizárólag orvos vagy a szükséges képzéssel rendelkező kezelő használhatja.
- A terméket a karbantartó személyzetnek biztonságos és működőképes állapotban kell tartania.
- Vegye figyelembe, hogy a teljes radiológiai rendszernek (beleértve a terméket is) meg kell felelnie az IEC 60601-1 szabványnak. Emiatt győződjön meg arról, hogy a termékhez csak az IEC szabványoknak megfelelő orvostechnikai eszköz csatlakozzon. A csatlakoztatott orvostechnikai eszközöknek (például röntgengenerátoroknak) meg kell felelniük az IEC 60601-1 szabványnak, a képrögzítő számítógépeknek és a kijelzőknek pedig az IEC 60601-1 vagy az IEC 62368-1 szabványnak. További részletekért forduljon az értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.
- A terméket használó rendszer hálózathoz való csatlakozása kockázatot jelenthet a betegek, a kezelők vagy harmadik felek nézve. Ezeket a kockázatokat a karbantartásért felelős kijelölt személy kell értékelje. A felelős személynek értékelnie kell azokat a kockázatokat is, melyek a hálózat csatlakozási utáni megváltozásakor (ideértve a hálózat konfigurálását vagy bővítését, a hálózati elemek leválasztását, illetve a hálózathoz csatlakoztatott berendezések frissítését vagy bővítését is) fellépnek.

A telepítéssel kapcsolatos tudnivalók

- Kérje meg értékesítési tanácsadóját vagy a helyi Canon forgalmazót a termék telepítésére.

A termék ártalmatlanításával kapcsolatos tudnivalók

- A termék törvénybe ütköző módon végzett ártalmatlanítása káros hatással van az emberek egészségére és a környezetre. Emiatt a termék ártalmatlanításakor feltétlenül tartsa be a területileg érvényes törvényeket és előírásokat.



Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és a helyi előírásoknak megfelelően kell történnjen. A terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – például hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírás szerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolódó potenciálisan veszélyes anyagok révén káros hatással lehet a környezetre és az egészségre. A termék megfelelő leselejtezésével pedig Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosításra való leadását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi hulladékkezelő közszolgáltatónál, a jóváhagyott WEEE rendszernél vagy a termék szállítójánál.

A fenti információk (beleértve az akkumulátorokra vonatkozókat is) honlapunkon az EU valamennyi tagországának hivatalos nyelvén elérhetők. Lásd <https://global.canon/en/ifu/medcom/envfile/weee-battery-eu.pdf>.

1 Biztonsági információ

1.1 Biztonsági óvintézkedések

A személyi sérüléseknek, valamint a berendezés/az adatok károsodásának megelőzése érdekében kövesse ezeket az óvintézkedéseket, és megfelelően használja a berendezést.

Működtetési/tárolási környezet

- **Ne használja vagy tárolja a berendezést gyúlékony anyagok, például alkohol, hígító, benzin stb. közelében.**

A kiömlő vagy elpárolgó vegyszerek a berendezésben található elektromos alkatrészekkel érintkezve tüzet vagy áramütést okozhatnak. Egyes fertőtlenítőszeresek gyúlékonyak. Ezek használata során fokozott gondossággal járjon el.

- **A berendezést a megadottakon kívül semmi máshoz ne csatlakoztassa.**

Ez ugyanis tűzhez vagy áramütéshez vezethet.

- **A berendezést ne telepítse az alábbiakban felsorolt helyekre és ne tárolja ilyen helyeken.**

Ennek figyelmen kívül hagyása működési zavarokat, a berendezésen fellépő hibákat, tüzet vagy balesetet okozhat.

- Vízet használó létesítmény közvetlen környezete
- Közvetlen napfénynek kitett helyek
- Légh kondicionáló vagy szellőzőberendezés levegőkivezetésének a közvetlen környezete
- Hőforrás, pl. radiátor közvetlen környezete
- Instabil tápellátású helyiség
- Padló
- Poros környezet
- Sós vagy kénes környezet
- Magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezet
- Fagynak vagy páralecsapódásnak kitett környezet
- Vibrációra hajlamos környezet
- Ferde vagy instabil terület

- **Ügyeljen rá, hogy a beteg csak 10 percnél rövidebb ideig érintkezzen folyamatosan a detektor felszínével. A belső eszköz által generált hőtől függően a detektor felülete akár 10 °C-kal is felmelegedhet. A fizikai stressz, valamint a beteg bőrével való érintkezés miatti alacsony hőmérsékletű égési sérülések megelőzése érdekében kerülje a detektor felületével való hosszabb idejű érintkezést.**
- **Ha a detektor használata során a hőmérséklet abnormálisan a fent megadott értékek fölé emelkedik, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba az értékesítési tanácsadójával vagy a helyi Canon forgalmazóval.**

A detektor maximális hőmérséklete: 45 °C*.

* Ezt az értéket a Canon maximális terhelésével, 35 °C-os környezeti hőmérséklet mellett végzett teszt során kapták.

Tápellátás és kábelek

- **Ne helyezzen nehéz tárgyakat (pl. orvostechikai eszköz) a kábelekre és vezetékekre, ne húzza össze, ne hajlítsa meg és ne kötegelje őket, valamint ne lépjen rájuk, mivel ezektől a burkolatuk megsérülhet. A kábeleket és vezetékeket ne módosítsa.**

Ellenkező esetben a vezetékek megsérülhetnek, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

- **Ne kapcsolja BE a tápellátást, ha a berendezésen páralecsapódás észlelhető.**

Ez ugyanis tűzhoz vagy áramütéshez vezethet.

- **A berendezés bekötőkábele használata esetén a kábel enyhén felmágneseződik. Ha szívritmusszabályozóval rendelkező betegeket tesz ki röntgensugárzásnak, mindig ügyeljen arra, hogy a felvétel alatt a betegnél ne lépjenek fel problémák.**

Probléma esetén a berendezés bekötőkábelét tartsa távol a betegtől, és konzultáljon az orvossal.

- **A háromeres tápkábelt mindig földelt hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.**
- **Ne helyezzen semmilyen akadályt az aljzat környékére, hogy a dugaszt bármikor könnyen kihúzhassa.**

Ellenkező esetben elképzelhető, hogy vészhelyzet esetén a dugasz nem húzható ki.

- **Mivel a berendezés kábele hosszú, ügyeljen rá, hogy használat közben ne gubancolódhasson össze. Figyeljen arra is, hogy a lába ne akadjon bele a kábelbe.**

Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy a felhasználó megsérülhet, amikor megbotlik a kábelben.

- **Soha ne töltsön fel elhasználódott akkumulátort!**

Az élettartama végét elérő akkumulátor töltés hatására túlmelegedhet, kigyulladhat, illetve felrobbanhat.

- **Ne töltsse az akkumulátort, ha a berendezés le van takarva egy tárggyal (pl. ruhával).**

Mivel ez túlmelegedéshez vagy tűzhoz vezethet.

Kezelés

- **Ne helyezzen semmilyen tárgyat a berendezés tetejére.**

Az ilyen tárgyak leeshetnek és sérüléseket okozhatnak. Ha a berendezésbe fémtárgyak (pl. tűk) esnek bele, vagy ha folyadék ömlik rá, akkor az tüzet vagy áramütést okozhat.

- **Ne üsse meg vagy ejtse le a berendezést. A berendezés egy nagy precizitású műszer, és mindig ennek megfelelően kezelje.**

Erős rázkódás hatására a berendezés károsodhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat, ha a berendezést javítás nélkül tovább használják.

- **Az akkumulátoregységet óvatosan csatlakoztassa.**
- **Ügyeljen rá, hogy az akkumulátoregység megfelelően legyen csatlakoztatva.**
- **Kérje meg a beteget, hogy vegyen fel egy rögzített testtartást, és ne hagyja, hogy a beteg szükségtelenül megérintse a berendezés elemeit.**

Ha a beteg megérinti a csatlakozókat vagy a kapcsolókat, az áramütéshez vagy a berendezés működési zavaraihoz vezethet.

- **Használat közben mindig ellenőrizze, hogy nincs-e probléma a CXDI rendszerrel vagy a beteggel. Probléma esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket, például állítsa le a rendszert.**
- **Ne érintse meg egyidejűleg a berendezés vezető részeit és a páciens.**

Ellenkező esetben áramütés következhet be.

- **Ne fröcsköljön a berendezésre a betegből származó testfolyadék, gyógyszer, víz stb.**

A detektor por- és vízálló védelemmel van ellátva. A berendezés használata előtt azonban vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket. A víz bejutása károsíthatja a berendezést, és tüzet vagy áramütést okozhat.

- Ne merítse a berendezést hosszabb időre víz alá.
- Ha a detektor nedvessé válik, száraz, puha ruhával törölje teljesen szárazra.
- Az akkumulátortartó fedelét mindig szorosan zárja le és rögzítse. Ha a fedél nincs rögzítve, akkor a por- és vízszigetelési teljesítmény csökkenhet.
- Ne nyissa ki vagy zárja be az akkumulátortartó fedelét, ha azon por található, vagy ha a berendezés nedves.
- Ne használja a detektort, ha vízcseppek vagy por került az akkumulátorrekeszbe.
- A fertőzésveszély megelőzése érdekében szükség esetén csomagolja be egy egyszer használatos tasakba a berendezést.
- Ha a detektor megütődött, leejtették vagy más egyéb fizikai behatás érte, akkor a por- és vízszigetelési teljesítménye csökkenhet.
- Az akkumulátortartó fedele fogyóeszköz. Ha az akkumulátortartó fedele elhasználódott, illetve ha a csomagolása sérült vagy repedezett, cserélje ki egy újra. Ha tovább használja az akkumulátortartó elhasználódott fedelét, akkor a berendezésbe por vagy víz juthat be.
- A bekötőkábel és a Multi Box közötti csatlakozás nem por- és vízálló.

- **Ha nem használja, biztonsági okból kapcsolja KI a berendezés minden részének az áramellátását.**

- **Ne helyezzen túl nagy súlyt a berendezésre.**
Na használja a berendezést úgy, hogy az 100 kg vagy annál nagyobb helyi terhelésnek legyen kitéve.
Ha a terhelés túllépi a határt, akkor a berendezés belső része károsodhat.
- **Ne érintse meg a berendezés és az akkumulátoregység elektródakivezetéseit.**
- **Ügyeljen arra, hogy a berendezést sima felületen, vízszintes helyzetben használja.**
Ha a detektor ferdén van elhelyezve vagy ha nyomást gyakorolnak rá, akkor a belső eszköz megsérülhet.
- **Ügyeljen arra, hogy a berendezést biztonságosan tartsa, miközben álló helyzetben használja.**
Ellenkező esetben a berendezés felborulhat, ami a felhasználó vagy a beteg sérülésével járhat, illetve a berendezés átfordulhat, ami a belső készülék károsodását okozhatja.
- **Ügyeljen rá, hogy csak az ehhez a termékhez adott akkumulátoregységet használja.**
- **Ha az akkumulátorfolyadék szivárog és a bőrrel vagy a ruházatával érintkezésbe kerül, akkor azt csapvízzel stb. haladéktalanul mossa le.**
Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés bőrirritációt válthat ki.
- **A vizsgálat előkészítése során ellenőrizze, hogy a megadott információk (beteg neve, azonosítószám, születési dátum, nem) megegyeznek-e a beteg adataival.**
Ha az információk helytelenek, akkor a betegek összekeveredhetnek, és a téves diagnózis a betegeknek kárt okozhat.
- **Csak sürgősségi vizsgálatához használja az [Emergency (Vészhelyzet)] gombot.**
Ha figyelmen kívül hagyják, a betegek összekeveredhetnek, és a téves diagnózis a betegeknek kárt okozhat.
- **Utasítsa a beteget arra, hogy a vizsgálat alatt ne mozogjon. Szükség esetén segítsen a betegnek a megfelelő testhelyzet megtartásában.**
Ha a beteg a vizsgálat alatt mozog, akkor elképzelhető, hogy nem sikerül megfelelő képeket készíteni.

Probléma fellépte esetén

- **Az alábbiak fellépte esetén azonnal kapcsolja KI a berendezés minden részének a tápellátását, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból, és lépjen kapcsolatba az értékesítési tanácsadóval vagy a helyi Canon forgalmazóval:**
 - Füst, furcsa szag vagy rendellenes zaj megjelenése
 - Folyadék ráfröccsenése a berendezésre vagy fémtárgy bejutása egy nyíláson keresztül
 - A berendezés leejtése vagy sérülése

Felülvizsgálat, fertőtlenítés, tisztítás

- **Na használjon gyúlékony oldószert a berendezés felszínének tisztítására.**

Amikor a berendezést meg akarja tisztítani, feltétlenül kapcsolja KI a berendezés minden részének tápellátását, vegye ki az akkumulátoregységet, és húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatról. Soha ne használjon alkoholt, benzint, hígítót vagy más gyúlékony oldószert. Ellenkező esetben tüzet okozhat.

- **Rendszeresen tisztítsa meg a tápkábel csatlakozóját úgy, hogy kihúzza a hálózati csatlakozóaljzatról, és száraz törlőruhával eltávolítja a port vagy szennyeződést a csatlakozóról, annak perifériás részéről és a hálózati csatlakozóaljzatról.**

Ha a tápkábelt poros, párás vagy kormos helyen hosszabb ideig bedugva tartja, akkor a dugó körüli por nedvességet szívhat fel, és ez szigetelési hibák miatt tüzet okozhat.

- **A fertőzésveszély megelőzése érdekében minden vizsgálat után fertőtlenítőszerrel (pl. fertőtlenítő etanollal) törölje le a detektor beteggel érintkező felületeit.**

A vérrel terjedő fertőzések vagy más okok fertőző betegség kialakulásához vezethetnek. A fertőtlenítés elvégzésének részleteivel kapcsolatban forduljon egy szakemberhez.

- **A detektort ne permetezze be közvetlenül fertőtlenítő- vagy tisztítószerekkel.**
- **Mindig tartsa tisztán a terméket és a többi berendezést, és távolítson el minden port és szennyeződést.**

A por és szennyeződés meghibásodást okozhat a radiológiai rendszerben található berendezésekben, például ebben a termékben és a számítógépekben.

- **Az akkumulátoregységet a tisztításhoz vízzel vagy hígított semleges tisztítószerrel enyhén megnedvesített ruhával törölje le.**

Az akkumulátoregység nincs védve a folyadékoktól. Az akkumulátoregységet a tisztításakor óvatosan törölje le, hogy ne juthasson tisztítószer az elektródákra.

- **Tisztítás után szárítsa meg teljesen az akkumulátoregységet, mielőtt a berendezésbe visszahelyezné.**
- **A detektornak az érzékelőoldaltól eltérő minden más részét a tisztításkor óvatosan törölje le, hogy ne juthasson tisztítószer az akkumulátoregység csatlakozóira (az elektródákra).**
- **A berendezés és a perifériák felületének tisztításához vizet vagy hígított semleges tisztítószert használjon. Ne törölje le a berendezés vagy a perifériák felületét oldószerekkel, például tiszta szesszel, hígítóval vagy benzinnel, mert ezek károsodást okozhatnak.**
- **A fertőtlenítés vagy tisztítás után teljesen szárítsa meg a detektort.**

1.2 A rádiófrekvenciával kapcsolatos tudnivalók

Ez a termék megfelel azon ország vagy régió helyi rádiófrekvenciás előírásainak, ahol a terméket vásárolta. Vegye figyelembe, hogy a vásárlás országán vagy régióján kívül más területen a termék nem használható.

A termék által használt frekvenciasávban nem csak ipari, tudományos és orvostechikai eszközök (például mikrohullámú sütők) üzemelhetnek, hanem a környéken található (engedélyköteles) helyszíni rádióállomások, a mobil objektumok azonosítására szolgáló, meghatározott kis teljesítményű (nem engedélyköteles) rádióállomások (pl. üzemi gyártósorok stb.), valamint az (engedélyköteles) amatőr rádióállomások is. A termék használata rádióinterferenciát okozhat a fent megadott berendezésekben és rádióállomásokban, ezért ügyeljen rá, hogy a használat előtt megértse az alábbi elővigyázatossági rendszabályokat.

- A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy nem működnek a közelben helyszíni rádióállomások és a mobil objektumok azonosítására szolgáló, meghatározott kis teljesítményű rádióállomások.
- Abban az esetben, ha a termékből származó rádióhullámok káros interferenciát okoznak a mobil objektumok azonosítására szolgáló helyszíni rádióállomásokon, azonnal hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba az értékesítési tanácsadójával vagy a helyi Canon forgalmazókkal.
- Akkor is vegye fel a kapcsolatot az értékesítési tanácsadójával vagy a helyi Canon forgalmazókkal, ha egyéb problémák merülnek fel, például ha a termék káros rádióinterferenciát okoz a mobil objektumok azonosítására szolgáló, meghatározott kis teljesítményű rádióállomásokon vagy az amatőr rádióállomásokon.
- Ez a termék alkalmas kórházi környezetekben (hivatásos egészségügyi intézményekben) való használatra, kivéve az aktív NAGYFREKVENCIA SEBÉSZETI BERENDEZÉSEK környezetét, valamint a mágneses rezonancia képalkotáshoz használt ORVOSTECHNIKAI RENDSZER számára rádiófrekvencián leárnýékolt olyan helyiséget, ahol az ELEKTROMÁGNESES ZAVAROK intenzitása magas.
- FIGYELMEZTETÉS:
Kerülje a berendezés más berendezések melletti használatát és tárolását, mivel ez helytelen működéshez vezethet. Ha a berendezést más berendezések közelében szükséges használni, akkor a normál működés ellenőrzése érdekében kövesse nyomon a működését.
- Az elektromágneses zavarokkal kapcsolatos optimális teljesítmény fenntartása érdekében kizárólag az erre kijelölt kábeleket használja.
- FIGYELMEZTETÉS:
A Canon értékesítési tanácsadója vagy a helyi Canon forgalmazó által megadottaktól eltérő berendezések, jelátalakítók és kábelek használata megnöveli az elektromágneses kibocsátást vagy csökkenti a berendezés elektromágneses zavartűrését, melyek hibás működést eredményezhetnek.
- FIGYELMEZTETÉS:
A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket (beleértve a perifériákat, például az antennakábeleket és a külső antennákat is) nem szabad a detektor bármely részéhez 30 cm-nél kisebb távolságról használni (beleértve a Canon értékesítési tanácsadója vagy a helyi Canon forgalmazó által megadott kábeleket is). Ellenkező esetben a berendezés teljesítménye csökkenhet.

1.3 A berendezés használatával kapcsolatos tudnivalók

A berendezés használatakor tartsa be a következő óvintézkedéseket. Ellenkező esetben problémák léphetnek fel, és előfordulhat, hogy a berendezés nem működik megfelelően.

A használat előtt

- Hideg helyen a helyiség hirtelen felmelegítése a berendezésben páralecsapódást okoz. Ilyen esetben az exponálás előtt várja meg, amíg a páralecsapódás elpárolog. Ha a berendezést olyankor használja, amikor páralecsapódás található rajta, akkor problémák léphetnek fel. Klímaberendezés használata esetén ügyeljen rá, hogy a hőmérsékletet fokozatosan emelje/csökkentse, hogy a páralecsapódás megelőzése érdekében a helyiség és a berendezés hőmérséklete között ne alakuljon ki különbség.

Használat közben

- A rádiófrekvenciás energiának való kitettség csökkentése érdekében tartsa távol a kezét és más testrészeit a detektor vezeték nélküli apertúrájától.
- Ne használja a detektort erős mágneses mezőt generáló eszközök közelében, különben képzaj keletkezhet, vagy a képen műtermékek jelenhetnek meg.
- Kerülje a betegek szükségtelen expozícióját, különösen gyermekeknél. A részletekért feltétlenül olvassa el a csatlakoztatott röntgengenerátor kézikönyvében a sugárvédelemmel kapcsolatban megadott óvintézkedéseket.
- Az akkumulátortöltő nincs védve (szigetelve) a műtőben előforduló folyadékokkal, például vérrel és gyógyszerekkel szemben.
- Az akkumulátortöltőt csak beltérben használja.
- Ne szerelje fel a készenléti jelzést és az infravörös adatkommunikációs egységet úgy, hogy annak infravörös adatportja a monitor, a reflektor vagy egy másik infravörös adatkommunikációs berendezés felé nézzen, kivéve az érzékelőt.
- A berendezésben lévő adathordozón tárolt képek és nyers adatok működési hibák, a berendezés meghibásodása vagy egyéb váratlan események miatt olvashatatlaná válhatnak, ezért ügyeljen rá, hogy az adatokat mindig külső adathordozón tárolja vagy pedig filmre rögzítse.

Fertőtlenítés és tisztítás

- A detektor beteggel érintkező felületeit a fertőtlenítésükkor törölje le fertőtlenítőszerrel, például fertőtlenítő etanollal enyhén megnedvesített fertőtlenítő kendővel.
- A detektort a tisztításhoz vízzel vagy hígított semleges tisztítószerrel enyhén megnedvesített ruhával törölje le.

Egyebek

- Ne használja ezt a terméket más berendezésekkel, például defibrillátorokkal vagy nagy méretű elektromotorokkal együtt, mert ezek a tápellátásban zajt vagy tápfeszültség-ingadozást okozhatnak, ami megakadályozhatja a termék és az egyéb berendezések normál működését.
- A termék működése meghibásodhat a mobiltelefonok, adó-vevők, távvezérlésű játékok stb. által keltett elektromágneses hullámok miatt. Ügyeljen arra, hogy ne vigyenek a termék közelébe ilyen jellegű tárgyakat, amelyek hatással lehetnek a termékre.
- Ha a detektort egy ideig nem használják, vegye ki belőle az akkumulátoregységet. Ellenkező esetben az akkumulátor túltölthet, ami csökkenti az akkumulátor élettartamát.

2 Bevezető

Ez a készülék emberi anatómia radiológiai képfelvételeinek előállítására során a radiográfiai filmes/képernyős rendszerek helyettesítésére használható minden általános célú diagnosztikai eljárásban. Röntgendiagnosztikai rendszerekbe integrálva fluoroszkópos képek készítésére is használható, kiváltva a spotfilmes eszközöket és a röntgen képerősítőket. Ez a készülék mammográfiás felvételek készítésére nem alkalmas.

3 Kezelési eljárások

3.1 Felkészülés a detektor használatára

- 1 Töltse fel az akkumulátoregységet.**
- 2 Csatlakoztassa az akkumulátoregységet.**
 - i)** Távolítsa el az akkumulátortartó fedelét.
 - ii)** Csatlakoztassa az akkumulátoregységet.
 - iii)** Helyezze fel az akkumulátortartó fedelét.

3.2 A detektor használata

- 1 Kapcsolja be a detektort.**
- 2 Regisztrálja a detektort, és csatlakoztassa a CXDI vezérlőrendszerhez.**
- 3 A vizsgálat elvégzése.**
 - i)** Válassza ki vagy regisztrálja a betegadatokat.
 - ii)** Válassza ki a protokollt.
 - iii)** Nyomja meg az exponáló gombot.
 - iv)** Ellenőrizze a rögzített képeket.

3.3 A detektor használatának befejezése

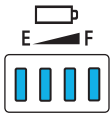
- 1 Kapcsolja ki a detektort.**

3.4 A detektor állapotjelzéseinek listája

Detektor állapota	Állapotjelzések	
	Állapot LED ^{*1}	Készenlét LED
Tápellátás KI	Nem világít	Nem világít
Tápellátás BE	Világít	Nem világít
Csatlakozás elindítva	Világít	Villog (csak 3 mp.) ^{*2}
Váltás exponálásra kész állapotra	Világít	Villog
Exponálásra kész állapot	Világít	Világít
Detektor kiválasztás állapota (alvó mód)	Világít	Nem világít
Hiba	Villog	Villog

^{*1} A tápellátás LED jelzése az akkumulátor maradék töltésének megfelelően változik.

^{*2} Csak a detektor csatlakozása után

Detektor állapota	Tápellátás LED jelzése
Bekapcsolva ^{*1}	
Indítás ^{*2}	
Kikapcsolás előkészítése ^{*3}	A lámpák egyenként világítanak A lámpák egyenként világítanak (Egy teljes sorozat, egy másodperces szünet)

^{*1} Ha az akkumulátoregység nincs csatlakoztatva

^{*2} Amíg a POWER (Tápellátás) gomb lenyomása és nyomva tartása után a kapcsolók működése engedélyezetté válik

^{*3} Amíg a detektor áramellátása ki nem kapcsol, miután a POWER (Tápellátás) gombot lenyomta és nyomva tartja

3.5 A készenléti jelzés jelzőlámpáinak/villogásainak/hangjelzéseinek listája

	Csatlakozás (illesztés) befejezve	Exponálásra kész állapot alatt	Exponálás alatt
		Indítási idő	Röntgensugárzás kibocsátása alatt
LED lámpa	A 2 LED lámpa villog ^{*1} .	A 2 LED lámpa tompa fénnel világít.	
Jelzőhang	Három sípolás	Egy sípolás	N/A

*1 A be- és kikapcsol állapot 0,5 másodpercenként háromszor változik

3.6 A képfeldolgozás beállítása

Az Elt érték beállítása

Az Elt értéke a CXDI vezérlőszoftver feldolgozási paraméterek szerkesztése képernyőjén állítható be.

Adjon meg egy értéket az EI aktuális értékét tartalmazó Elt mezőben.

- EI (expozíciós index)
Az EI a detektort elérő dózis közelítő mutatószáma, melyet a rögzített képből az IEC 62494-1 szabványnak megfelelően számítanak ki.
- Elt (cél expozíciós index)
Az Elt a cél EI szintet jelenti.
- DI (eltérés index)
A DI egy, az EI és az Elt közötti különbséget jelző logaritmikus index.

4 Hibaelhárítás

Ha a termék használata közben az ebben a fejezetben leírt problémákba ütközik, vagy ha a CXDI vezérlőszoftverben hibaüzenetek jelennek meg, akkor az ebben a fejezetben található táblázatban keresse meg a problémát vagy a hibaüzenetet, és próbálja ki az ott megadott megoldásokat.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a detektort, és forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz, és tájékoztassa őket a probléma részleteiről, a hibakódokról vagy a hibaüzenetekről.

Tünet	Ok/hibaüzenet a CXDI vezérlőszoftverben	Megoldás
A tápellátás LED villog (1 másodpercenként) és exponálás nem lehetséges.	Az akkumulátor lemerült.	Cserélje ki az akkumulátoregységet egy teljesen feltöltöttre, majd próbálja újra az exponálást.

5 Karbantartás

Karbantartás és ellenőrzés

Ha az alábbi ellenőrzések során bármilyen problémát észlel, és azt nem sikerül megoldania, forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

Napi ellenőrzés

Kábel

- (1) Ellenőrizze, hogy a kábelek nem sérültek-e meg, illetve a kábelköpenyek nincsenek-e úgy elszakadva, hogy a kábelek belseje szabaddá vált.
- (2) Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozói biztonságosan rögzülnek-e a berendezés váltakozó áramú bemenetéhez és a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- (3) Ellenőrizze, hogy ne legyen törés vagy rövidzárlat a detektor csatlakozódugóinak érintkezőiben.
- (4) Ellenőrizze, hogy ne legyen por, szennyeződés vagy olaj a bekötőkábel csatlakozóin.

Detektor

- (1) Ellenőrizze, hogy ne legyenek laza vagy hiányzó csavarok.
- (2) Ellenőrizze, hogy a detektor külső részén ne legyen törés vagy deformálódás.
- (3) Ellenőrizze, hogy ne legyen por vagy idegen test az akkumulátorrekesz csatlakozóin.
- (4) Ellenőrizze, hogy ne legyen törés vagy rövidzárlat az akkumulátorrekesz csatlakozóin.
- (5) Ellenőrizze, hogy ne legyen por, szennyeződés vagy olaj a kábelcsatlakozókon.
- (6) Ellenőrizze, hogy az akkumulátortartó fedele ne legyen sérült vagy meghajlott.
- (7) Ellenőrizze, hogy az akkumulátortartó fedelében lévő guminak ne legyen semmi baja (idegen testek, szakadások, repedések stb.).

A tápellátás bekapcsolása után

Ügyeljen rá, hogy az alábbi ellenőrzések elvégzése előtt a CXDI vezérlőszoftver el legyen indítva.

- (1) Végezzen teszt exponálást.
Ellenőrizze, hogy a rögzített képek megfelelően jelennek-e meg a monitoron.

Havi ellenőrzés

- (1) Végezzen teljesítménytesztet.
- (2) Rendszeresen indítsa el az öndiagnosztikát.

Éves ellenőrzés

- (1) Végezzen teljesítménytesztet vagy öndiagnosztikát fantommal, felbontási táblával stb.
- (2) Ellenőrizze a rögzített képek EI értékét.

Eseti ellenőrzés

- (1) Az alábbiak fellépte esetén végezzen kalibrálást.
 - Ha az exponálási feltételek jelentősen megváltoztak
 - Ha a képek valamilyen szempontból furcsának tűnnek
 - Ha a telepítési környezet jelentősen megváltozott

6 Specifikáció

6.1 Alapvető műszaki adatok

Síkdetektor: AF-B1

Környezeti feltételek:

Működés

Hőmérséklet:	5 °C és 35 °C között
Páratartalom:	15%–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Légnyomás:	613–1060 hPa

Tárolás (kicsomagolva)

Hőmérséklet:	5 °C és 40 °C között
Páratartalom:	15%–85% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Légnyomás:	613–1060 hPa

Szállítás és tárolás (eredeti csomagolásban)

Hőmérséklet:	–30 °C és 50 °C között
Páratartalom:	10%–95% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Légnyomás:	613–1060 hPa

Alkalmazható rács (egyéb eszközök): 40 lp/cm
(A rács tájolására telepítési korlátozások vonatkoznak.)

A szórt sugárzás csökkentése: A kontraszt szórt sugárzás okozta csökkenése még akkor is javítható képfeldolgozással, ha nincs rács a detektorra erősítve. Az Effektus jelölőnégyzet bejelölésével állítsa be a szóráskorrekció erejét, hogy engedélyezze ezt a vezérlőt a CXDI vezérlőszoftver Szóráskorrekció vezérlőképernyőjén.

Névleges tápellátás: 22–24 V DC, 1,2 A

Méretek és tömeg: Kb. 460 x 460 x 15,5 mm
Kb. 3,5 kg (az akkumulátoregységgel együtt)

LB-4A akkumulátoregység

Típus:	lítiumion-akkumulátor
Működési hőmérséklet-tartomány:	5 °C és 35 °C között
Névleges feszültség:	11,1 V DC
Kapacitás:	Jellemzően: 1660 mAh/min. 1600 mAh
Élettartam:	Kb. 300 ciklus (teljes töltöttségtől teljes lemerülésig)
Méreték és tömeg:	Kb. 93 x 162 x 7 mm (a kivetítő alkatrészecskék nélkül) Kb. 160 g

Képrögzítő számítógép

CPU:	Intel CPU 4 maggal és 8 szállal vagy többel
HDD:	Minimum 50 GB szabad tárhely
RAM:	Minimum 16 GB
Videokártya:	DirectX 10 kompatibilis Min. 2048 MB VRAM Compute Capability 6.0 vagy újabb Az Intelligens NR dinamikus képalkotáshoz funkció használata esetén DirectX 10 kompatibilis Min. 4096 MB VRAM Compute Capability 7.5 vagy újabb
OS:	Microsoft Windows 10 (X64)

6.2 Karakterisztika

Térbeli felbontási jellemzők

A tipikus MTF érték 2 ciklus/mm esetén: az RQA5 értéke 0,38. A méréshez kapcsolódó bizonytalanság szintje a becslések szerint kevesebb, mint $\pm 10\%$. A tipikus MTF-érték a sorozatgyártás elején készült berendezések MTF-értékeinek átlaga.

DQE

A tipikus DQE érték 2 μGy esetén 0 lp/mm-nél: az RQA5 értéke A méréshez kapcsolódó bizonytalanság szintje a becslések szerint kevesebb, mint $\pm 10\%$. A tipikus DQE-érték a sorozatgyártás elején készült berendezések DQE-értékeinek átlaga.

7 Szabályozással kapcsolatos információk

7.1 Az orvostechnikai eszközök osztályozása

Áramütés elleni védelem típusa

Az áramütés elleni védelem mértéke

Belső meghajtású berendezés

I. osztályú berendezés Multi Boxszal

B típusú betegoldali alkatrészek: detektor (hordozható típus)

7.2 CE-jelölés

Ez a termék megfelel a következőknek:

2017/745/EU rendelet

2011/65/EU irányelv

2014/53/EU irányelv

2014/30/EU irányelv

2014/35/EU irányelv

7.3 Az Európai Unió esetén

Értesítés a súlyos eseményről

Minden olyan (a 2017/745/EU rendelet 2. cikkének (65) bekezdésében meghatározott) súlyos eseményt, amely a termékkel kapcsolatban történt, jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Elektronikus használati útmutató

Az ügyfelek az alábbi weboldalon megtekinthetik, illetve onnan letölthetik a használati útmutatót.

- <https://global.canon/en/ifu/medcom/index.html>

További részletekért forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

7.4 EMD (elektromágneses zavarok)

Ez a termék lakóépületekben vagy lakóépületeket ellátó közüzemű kifesztésű áramellátó hálózathoz csatlakozó létesítményekben nem használható.

7.5 A berendezésen található jelölések részletei



Egyenáram



Váltakozó áram



B típusú betegoldali alkatrész



Olvassa el a használati útmutatót



Nem ionizáló sugárzás



Gyártó



Gyártás dátuma



Sorozatszám



Ez a jelzés azt jelzi, hogy ezt a berendezést az Európai Unióban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE) értelmében külön kell gyűjteni.



Ez a jelzés olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amely megfelel a 2017/745/EU rendeletnek.

8 A rendszer összetevői

Az összetevők különálló elemként vagy készlet részeként is elérhetők.

CXDI-RF Wireless B1

(egység: darab)

Főbb összetevők

Síkdetektor: AF-B1

Detektor

Érzékelőegység: AF-B4343W	1
Akkumulátoregység: LB-4A	2

Vezérlőszoftver

Multi Box: MB-01

Multi Box	1
Tápkábel	1

Opcionális összetevők

Bekötőkábel: WC-01

Állapotjelző: SI-01

Akkumulátoregység: LB-4A

Készenlét jelző: RI-3A

Kapcsos rögzítő (rögzítőkampók, rögzítőhurkok)
(egy pár már fel van szerelve a termékre)..... 3 pár

Akkumulátortöltő: BC-01

Akkumulátortöltő	1
Váltakozó áramú adapter	1
Tápkábel	1

Akkumulátortöltő: BC-1A

Akkumulátortöltő	1
Tápkábel	1

XIF bővítőegység röntgenfelvételhez: IFU-MB01-XIF

Röntgen interfészkábel bővítőegység

XIF bővítőkártya	1
XIF-kábel	1
Összekötőcsavarok	4

AF-B4343W bővítőegység: IFU-MB01

AF-B4343W bekötőkábel bővítőegység

AF-B4343W bővítőkártya	1
Bekötőkábel	1
Süllyesztett fejű csavarok	2
Összekötőcsavarok	4

CXDI-710/702 sorozat bővítőegység: IFU-MB01-S

710/702 sorozat bekötőkábel bővítőegység

CXDI-710/702 sorozat bővítőkártya	1
CXDI-710/702 sorozat bővítés-bekötőkábel	1
Süllyesztett fejű csavarok	2
Összekötőcsavarok	4

Kiegészítő detektor

CXDI-710C Wireless detektor**CXDI-810C Wireless detektor****CXDI-410C Wireless detektor****CXDI-702C Wireless detektor: AR-C3543W****CXDI-402C Wireless detektor: AR-C4343W****CXDI-703C Wireless detektor****CXDI-803C Wireless detektor****CXDI-403C Wireless detektor****CXDI-720C Wireless detektor****CXDI-820C Wireless detektor****CXDI-420C Wireless detektor****CXDI-420C Fixed detektor**

A szoftver opcionális funkciói

Szóráskorrekció a CXDI sorozathoz^{*1}

Fejlett élkiemelés^{*2}

Szabad forgatás a CXDI sorozathoz^{*3}

CXDI tomoszintézis funkció^{*4}

CXDI DSA funkció^{*5}

Beépített AEC segéd^{*6}

Intelligens NR dinamikus képalkotáshoz^{*7}

^{*1} Javítja a szórt sugárzás miatti kontrasztszökkentést.

^{*2} Fokozza a katéterek, csontos részek, egyes idegen anyagok, például géz stb. megjelenítését a rögzített képen.

^{*3} A képek egy fokként elforgathatók.

^{*4} Rekonstruálja a tomogramokat a Digital Cine képekből.

^{*5} DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) elvégzése.

^{*6} Lehetővé teszi a kezelőknek, hogy meghatározzanak egy pixelértéket, illetve hogy a rendszer egy automatikus üzenetet küldjön a röntgengenerátornak az adott érték elérése esetén. Ez a funkció önmagában nem hivatott az AEC-funkció biztosítására. A funkciót a radiográfiás képalkotási rendszeren gyártójának implementálnia az AEC-funkció elérése érdekében.

^{*7} Zajcsökkentés végrehajtása a képeken AI (mesterséges intelligencia) használatával.

9 Szerviz információk

A termék élettartama

A termék becsült élettartama megfelelő rendszeres ellenőrzés és karbantartás mellett akár hét év is lehet.

Rendszeres ellenőrzés és karbantartás

A betegek, a kezelőszemélyzet és a harmadik felek biztonságának, valamint a berendezések teljesítményének és megbízhatóságának megőrzése érdekében gondoskodni kell a rendszeres, legalább évente egyszeri ellenőrzéséről.

A cserealkatrészek biztosítása

A termék teljesítmény-alkatrészeit (a termék működésének fenntartásához szükséges alkatrészeket) a javítás érdekében a gyártás leállítása után még 8 évig raktáron tartjuk.

Fogyóeszközök

Az alábbi fogyóeszközök a jellemzőik és a szerkezetük miatt elhasználódhatnak. A fogyóeszközök beszerzése kapcsán forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

- LB-4A akkumulátoregység (élettartam: kb. 300 ciklus)
- Akkumulátorrekesz fedele (csereidőszak: kb. 2 évente)

Műszaki leírás

A műszaki leírást lásd a termék felhasználói kézikönyvében.



Gyártó:

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japán

Telefon: (81)-3-3758-2111

Verzió dátuma: 2025-03

BT8-2227-HU03

© CANON INC. 2024–2025